


プラスチックフレーム用鼻盛り改良パーツ

樹脂タイプ


C.N.P.A

==== Type1 / Type2 ====

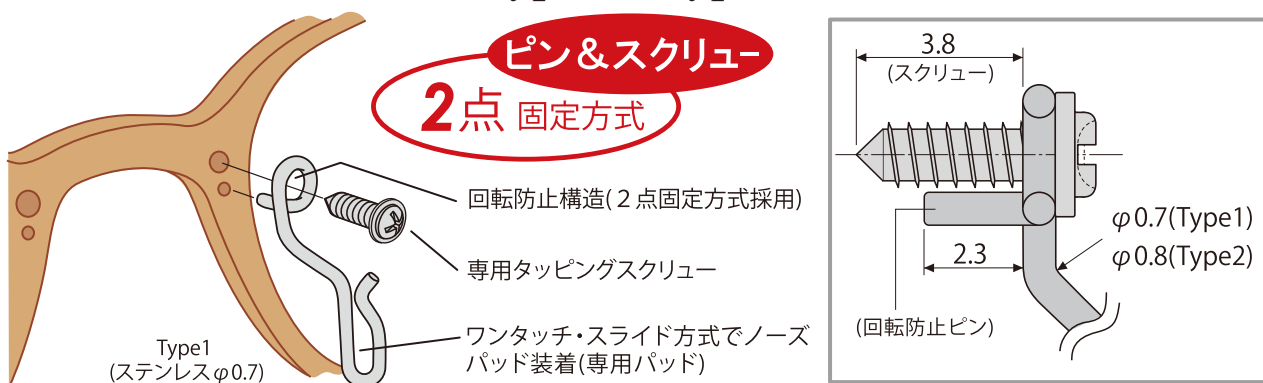

取扱い説明

1

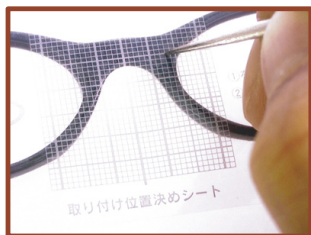

加工する枠のテンプレを外し鼻盛りをカットして表面を仕上げた後、アームを取り付ける位置が決定したら、ピンの埋込み部にマークをつけ、千枚通し等の先端でドリルの案内をつけます。

※取付け位置決めシート使用。

2



ドリルバイスの先端からドリル(φ0.7)をピンの埋込み分(3.0mm)だけバイス先端から出して①でマークした案内部に対し垂直に穴をあけます。

※タイプ2は(φ0.8)のドリルを使用。

注:フレームの厚みが薄い場合にはピンとネジの先端をカットしてご使用下さい。


3



②であけた穴にアームの左右を確認後、アームのピンを差込みます。

注:この時アームの開きを、お客様の鼻に合わせて仮決めします。

4

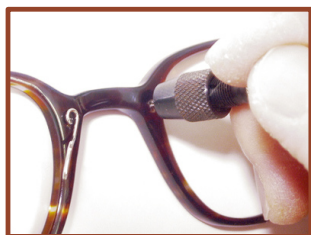

③で取り付けした左右のアームの開きを確認決定後、リング部の中央上寄りに千枚通し等の先端で案内をつけます。

一度アームを外してネジ込み下穴用ドリル(φ1.0)をネジ込み分(4.0mm)だけバイス先端から出して案内部に対し垂直に穴をあけます。

5



再度、アームを取り付け、専用タッピングネジで締め込みます。

注:必要以上に締め込まないで下さい。ネジが空回りしてフレーム破損の原因になります。

6



ノーズパッドは、スライド式で取り付けます。

注:取り付けパッドは、専用のパッドをご使用下さい。

ホームページでも詳しく掲載しております。 ▶ <http://ssmt.jp>

お取り扱いの際にご不明な点がございましたらお気軽にお申しつけ下さい。