


TITARM 取り付けマニュアル




① 鼻盛り部をニッパー等で切断します。

注: フレームに傷をつけないようテンブルやレンズは取り外して下さい。

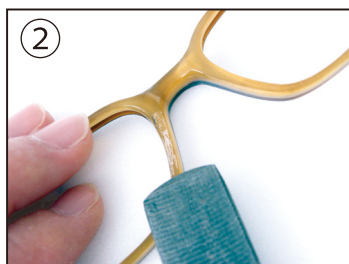


② 鼻盛り部を切断した跡をヤスリ等で削り、フラットな面にして下さい。ヤスリがけ後のバリはカッター等で取り除いて下さい。またはバフ研磨で仕上げして下さい。

注: 周辺のリム部にキズを付けないように注意して下さい。

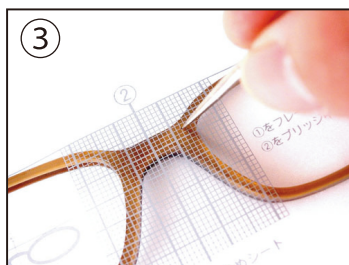

③ 埋め込み穴をあける箇所に、ドリルの刃先が入り易いように千枚通し等で左右対照に目印を付けて下さい。

注: 位置決めシートを利用すると便利です。

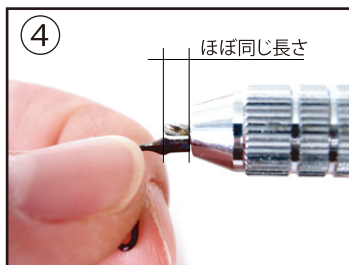

④ ドリルバイス(V-C)にφ1.5のドリルを取付けます。写真のようにチタームの埋め込み分だけのドリルを出してセットして下さい。

注: フレームの厚みが薄い場合埋め込み部をヤスリ等で削って下さい。




⑤ ③で付けた目印穴にドリルバイスを垂直に立て、プレにより穴径が大きくなりないように下穴をあけて下さい。
ドリルを抜き終わるまで時計回りで回転させて下さい。

注: 穴あけの際は過剰に押え付けないで下さい。ドリルがバイスに押し込まれ、必要な穴の



写真のように、アームホルダーのネジを適度に緩めて、溝に沿わせてチタームをセット後、軽くネジを締めて下さい。

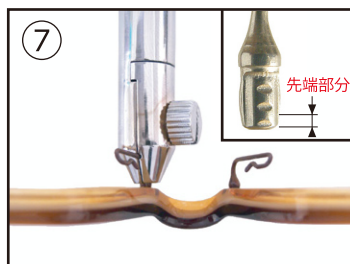


まず下穴にパーツの先端部分だけをねじ込む様に差込んで開き角度も同時に確認して下さい。



アームの開き角度を確認後、フレームに対して力強く垂直に押し込んで下さい。

注: 回しながらの挿入は絶対にして下さい。

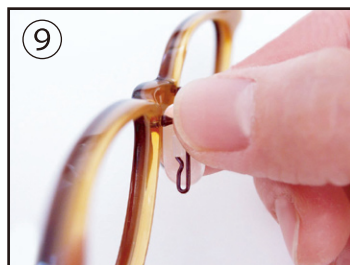

アーム装着後、パッドをスライドさせながら固定して下さい。



チターム装着完了。

注: 極端な調子とりは避けて下さい。アームが細いため破損することがあります。